

## NAVODILA ZA UPORABO ZAŠČITNE MASKE S TRAKOVI

Zaščitni maska je namenjena za zaščito osebja ali pacientov.


Izberite ustrezno masko, s primerno stopnjo zaščito, glede na namen uporabe.

Pred uporabo preverite embalažo in masko, ki ne smeta biti poškodovana. Preverite tudi rok uporabe.

Maske ne smete uporabljati, če ste alergični na materiale, ki jo sestavljajo.

Pred uporabo mora biti maska primerno shranjena, v skladu z navodili proizvajalca.

### Namestitev:

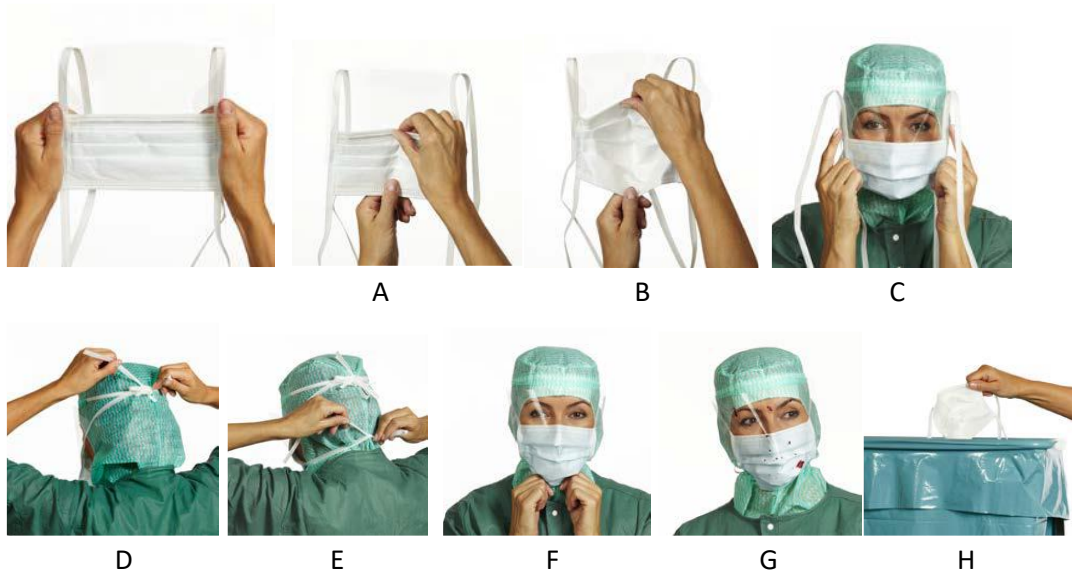

- A. Oblikujte nosno sponko. Nosna sponka mora biti na zgornji strani.
- B. S palcem in kazalcem ene roke primite zgornji rob maske (pri nosni sponki) in s palcem ter kazalcem druge roke primite spodnji rob maske na sredini in masko povlecite narazen, da jo razprete. Pri barvni maski pazite, da je bela stran obrnjena navznoter.
- C. Namestite masko čez nos in usta.
- D. Zgornje trakove namestite na zadnji zgornji del glave in jih tesno zavežite, da čimbolj preprečite uhajanje zraka.
- E. Spodnje trakove namestite nad zatilje in jih tesno zavežite, da čimbolj preprečite uhajanje zraka.
- F. Masko povlecite navzdol, da v celoti raztegnete gube. Če je potrebno nosno sponko ponovno prilagodite obliki nosu.
- G. Če obstaja nevarnost tekočinske razpršitve, potem izberite masko z odpornostjo na kapljični pritisk («splash/ fluid resistance»; oznaka »R« poleg tipa maske) in si zaščitite oči z zaščitnimi očali ali uporabite masko z odpornostjo na kapljični pritisk in z vezirjem. Masko zamenjajte po dveh urah uporabe ali prej, če je kontaminirana (tudi če je to med operacijo) in/ali v skladu z navodili stroke, ki je relevantna za to področje.
- H. Po uporabi kirurško masko zavržite v skladu z navodili stroke, ki je relevantna za to področje.

