

## NAVODILA ZA UPORABO ZAŠČITNE MASKE Z UŠESNO ZANKO

Zaščitni maska je namenjena za zaščito osebja ali pacientov.


Izberite ustrezno masko, s primerno stopnjo zaščito, glede na namen uporabe.

Pred uporabo preverite embalažo in masko, ki ne smeta biti poškodovana. Preverite tudi rok uporabe.

Maske ne smete uporabljati, če ste alergični na materiale, ki jo sestavljajo.

Pred uporabo mora biti maska primerno shranjena, v skladu z navodili proizvajalca.

### Namestitev:

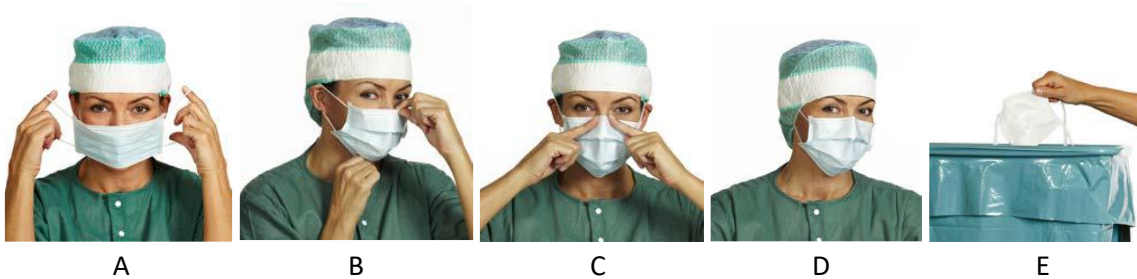

- A. Vstavite svoje prste skozi ušesni zanki/elastiki. Nosna sponka mora biti na zgornji strani. Pri barvni maski pazite, da je bela stran obrnjena navznoter. Namestite masko čez nos in usta.
- B. Zanki namestite okoli ušes. Nosno sponko s palcem in kazalcem ene roke pritisnite ob nos in jo držite na nosu. S palcem in kazalcem druge roke primite spodnji rob maske na sredini in masko povlecite navzdol, čez rob brade tako, da v celoti raztegnete gube. Na ta način je zagotovljena maksimalna pokritost obraza, s čimer zmanjšate možnost uhajanja zraka ob straneh maske.
- C. Nosno sponko prilagodite obliki nosu.
- D. Ušesa in lasje naj bodo pokriti s primernim pokrivalom, da se zmanjša kontaminacija z lasmi in ostalimi delci. Če obstaja nevarnost tekočinske razpršitve, potem izberite masko z odpornostjo na kapljični pritisk (»splash/ fluid resistance«; oznaka »R« poleg tipa maske). Masko zamenjajte po dveh urah uporabe ali prej, če je kontaminirana (tudi če je to med operacijo) in/ ali v skladu z navodili stroke, ki je relevantna za to področje.
- E. Po uporabi zaščitno masko zavržite v skladu z navodili stroke, ki je relevantna za to področje.

