

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO ZAŠČITNEGA PLAŠČA

Zaščitni/ izolacijski plašč je namenjen za zaščito osebja ali pacientov.

Izberite ustrezen plašč, s primerno stopnjo zaščite, glede na namen uporabe.

Pred uporabo preverite embalažo in plašč, ki ne smeta biti poškodovana. Preverite tudi rok uporabe.

Plašča ne smete uporabljati, če ste alergični na materiale, iz katerih je plašč.


Izberite plašč primerne velikosti, katerega dolžina mora segati preko kolen, rokavi pa preko zapestja.

Pred uporabo mora biti plašč ustrezno shranjen in skladiščen, v skladu z navodili proizvajalca.

Plašč si oblecite na način, da najprej potisnete roki skozi rokava. Razporek je na hrbtni strani.

Pritrdite velcro trak ali zavežite trakova (odvisno od modela plašča) v predelu zatilja.


Zavežite trakova v predelu pasu (v pentljo). Hrbet mora biti v celoti pokrit.

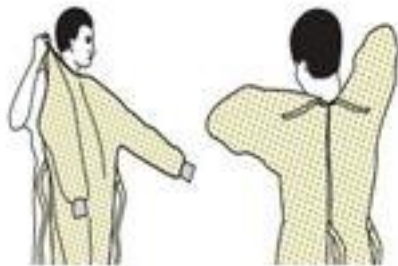

Plašč je namenjen za enkratno uporabo. Menjajte ga po končanem procesu, za katerega ga uporabljate, ali prej, če se kontaminira in/ ali poškoduje. Glede menjave upoštevajte tudi mnenja in priporočila stroke, ki je relevantna za to področje.

Po uporabi plašč slecite na način, da najprej pretrgate pentljo v predelu pasu, odprite velcro trak ali pretrgate pentljo v predelu zatilja (odvisno od modela plašča). Plašč potegnete stran od vratu, preko ramen in ga potegnete preko rok. Pri tem pazite, da se dotikate le notranje strani plašča.

Obrnite/ zasučite plašč iz notranje strani preko zunanje.

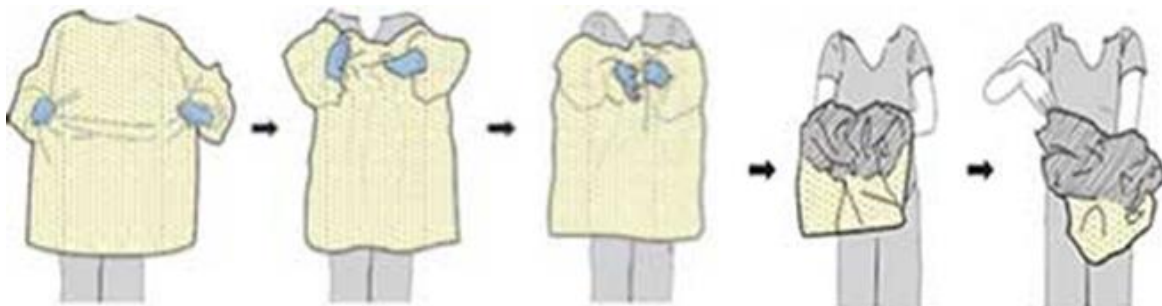

Plašč po uporabi zavržite v koš/ kontejner z odpadki v skladu z navodili stroke, ki je relevantna za to področje..